

Bestellinformation



Larynx-Tubus LT, farbkodierte Spritze und Beißblock

Größe	Patient	Gewicht / Größe	Konnektor	REF	VE
0	Neugeborene	< 5 kg	transparent	32-01-000	1
1	Babys	5-12 kg	weiß	32-01-001	1
2	Kinder	12-25 kg	grün	32-01-002	1
2.5	Kinder	125-150 cm	orange	32-01-025	1
3	Erwachsene	< 155 cm	gelb	32-01-003	1
4	Erwachsene	155-180 cm	rot	32-01-004	1
5	Erwachsene	> 180 cm	violett	32-01-005	1



Larynx-Tubus LT-D, farbkodierte Spritze und Beißblock

10er Set

Größe	Patient	Gewicht / Größe	Konnektor	REF	VE
0	Neugeborene	< 5 kg	transparent	32-02-000-1	1
1	Babys	5-12 kg	weiß	32-02-001-1	1
2	Kinder	12-25 kg	grün	32-02-002-1	1
2.5	Kinder	125-150 cm	orange	32-02-025-1	1
3	Erwachsene	< 155 cm	gelb	32-02-003-1	1
4	Erwachsene	155-180 cm	rot	32-02-004-1	1
5	Erwachsene	> 180 cm	violett	32-02-005-1	1

1er Set

0	Neugeborene	< 5 kg	transparent	32-02-100-1	1
1	Babys	5-12 kg	weiß	32-02-101-1	1
2	Kinder	12-25 kg	grün	32-02-102-1	1
2.5	Kinder	125-150 cm	orange	32-02-125-1	1
3	Erwachsene	< 155 cm	gelb	32-02-103-1	1
4	Erwachsene	155-180 cm	rot	32-02-104-1	1
5	Erwachsene	> 180 cm	violett	32-02-105-1	1

Kinder-Notfall Set,

LT-D #0, #1, #2, #2.5 und farbkodierte Spritze 32-02-309-1 1

Erwachsenen-Notfall Set,

LT-D #3, #4, #5, farbkodierte Spritze und Beißblock 32-02-209-1 1



Larynx-Tubus LTS II, farbkodierte Spritze und Beißblock

Größe	Patient	Gewicht / Größe	Konnektor	REF	VE
0	Neugeborene	< 5 kg	transparent	32-05-000	1
1	Babys	5-12 kg	weiß	32-05-001	1
2	Kinder	12-25 kg	grün	32-05-002	1
2.5	Kinder	125-150 cm	orange	32-05-025	1
3	Erwachsene	< 155 cm	gelb	32-05-003	1
4	Erwachsene	155-180 cm	rot	32-05-004	1
5	Erwachsene	> 180 cm	violett	32-05-005	1



Larynx-Tubus LTS-D, farbkodierte Spritze Beißblock

10er Set

Größe	Patient	Gewicht / Größe	Konnektor	REF	VE
3	Erwachsene	< 155 cm	gelb	32-06-003-1	1
4	Erwachsene	155-180 cm	rot	32-06-004-1	1
5	Erwachsene	> 180 cm	violett	32-06-005-1	1

1er Set

3	Erwachsene	< 155 cm	gelb	32-06-103-1	1
4	Erwachsene	155-180 cm	rot	32-06-104-1	1
5	Erwachsene	> 180 cm	violett	32-06-105-1	1

Erwachsenen-Notfall Set,

LTS-D #3, #4, #5, farbkodierte Spritze und Beißblock 32-06-209-1 1

VBM Larynx-Tubus

Der Larynx-Tubus ist ein supraglottischer Luftweg für die Anwendung in der Allgemeinanästhesie unter spontaner oder positiver Druckbeatmung. Im Notfall ist der Larynx-Tubus ein ideales Hilfsmittel zur Atemwegssicherung beim schwierigen Atemweg, als alternative Technik zur Maskenbeatmung und endotrachealen Intubation.

Die Sicherung des Atemweges ist einer der zentralen Aspekte bei der Durchführung einer erfolgreichen Reanimation. In den aktuellen Leitlinien des European Resuscitation Council (ERC) ist der Larynx-Tubus als alternatives Hilfsmittel zur Atemwegssicherung während der CPR implementiert.

LT



Einlumiger Tubus,
autoklavierbar
Material: Silikon
Rein verpackt

LTS II




Doppelumiger Tubus
mit Drainagekanal,
autoklavierbar
Material: Silikon
Rein verpackt

LT-D




Einlumiger Tubus
zum Einmalgebrauch
Material: PVC
Steril verpackt

LTS-D

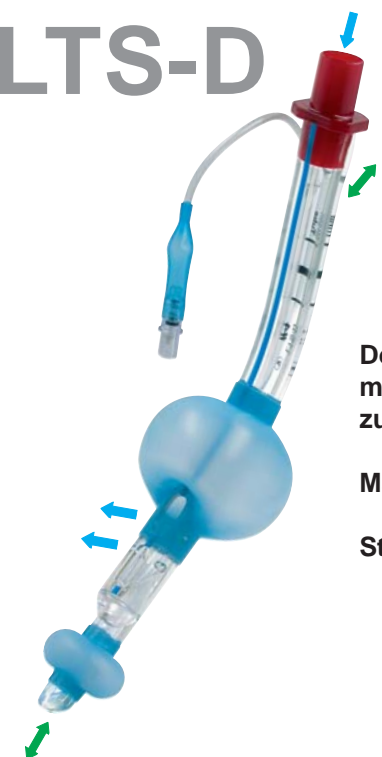

Doppelumiger Tubus
mit Drainagekanal
zum Einmalgebrauch
Material: PVC
Steril verpackt

Produkteigenschaften

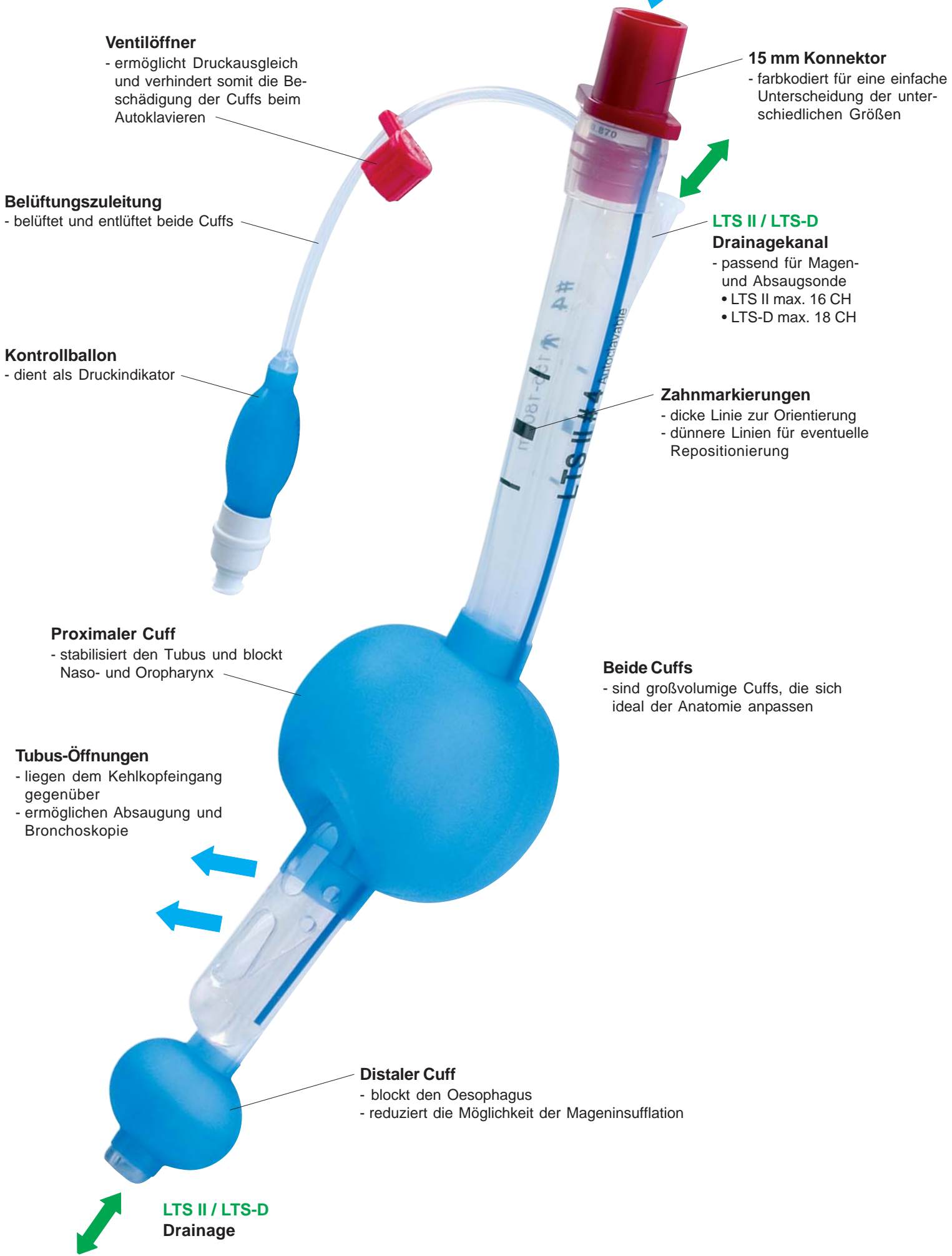

Produkteigenschaften

FARBKODIERUNG

- Konnektoren und Spritze sind farbkodiert
- die ungefähren Füllvolumen der jeweiligen Größen sind auf der Spritze angegeben, um ein schnelles Belüften zu ermöglichen
- bei elektiven Anwendungen wird ein Cuffdruck von 60 cmH₂O empfohlen (VBM Cuffdruckmeßgerät "UNIVERSAL")

BEIßBLOCK

- klickt in den Tubus und schützt diesen vor Okklusion
- ermöglicht Tubusfixation mittels elastischem Halsband

DESIGN

- Form und Design ermöglichen ein blindes Einführen (ohne Laryngoskopie) und positionieren den Larynx-Tubus im Hypopharynx
- zwei Ausführungen:
 - LT / LT-D, zur Beatmung
 - LTS II / LTS-D, zur Beatmung und Absaugung

Zubehör

Cuffdruckmeßgerät "UNIVERSAL"

- ermöglicht den Druck von 60 cmH₂O bei elektiven Anwendungen zu halten

REF 54-07-000

Spritze
mit Luer Anschluss und Farbkodierung für Larynx-Tuben

Größe	LT	REF	VE
20 ml	#0-1	54-04-111	10
60 ml	#2-3	54-04-444	10
100 ml	#4-5	54-04-555	10

Beißblock mit elastischem Halsband

- passend für Larynx-Tuben #2 und 2.5

Größe 4	REF 40-66-040-1	zum Einmalgebrauch
Größe 5	REF 40-76-050	wiederverwendbar

- passend für Larynx-Tuben #3, 4 und 5

Größe 6	REF 40-66-060-1	zum Einmalgebrauch
	REF 40-76-060	wiederverwendbar

