


VBM Baby-Mütze

Die neu entwickelte Baby-Mütze von VBM ermöglicht die Fixierung eines ET-Tubus' sowie von Sonden und Schläuchen ohne die Verwendung von Pflastern. Die Mütze wird aus reiner Baumwolle hergestellt und ist daher besonders angenehm auf der Haut. Die VBM Baby-Mütze ist in unterschiedlichen Größen, für Früh- und Neugeborene bis Säuglinge erhältlich.

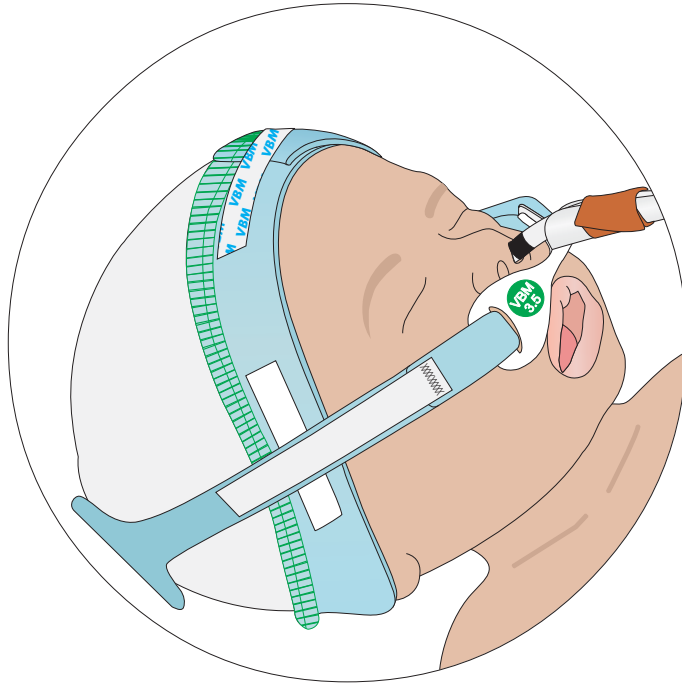

- **Baby-Mütze**
Mütze mit Fixationssystem für Sonden und Schläuche
- **Baby-Mütze mit Endofix**
Mütze mit Fixationssystem für ET-Tuben, Sonden und Schläuche

Die Babymütze bietet vielseitige Anpassungs - möglichkeiten:

- 6 Mützengrößen, die innerhalb der Größe nochmals variabel angepasst werden können
- Das Halsband ist sowohl in der Positionierung, als auch in der Länge variabel
- Flange in unterschiedlichen Größen für passenden ET-Tubus

Produkteigenschaften

Öffnung

- bietet einfachen und schnellen Zugang zum Kopf

Farbcode

- Größen werden durch jeweilige Farbe der Naht gekennzeichnet

Klettstreifen

- zum Anpassen der Größe

Fixierungssteg

- Rinne passend für Größe des ET-Tubus'

Schaumstoff-Halsband


- weich und hautverträglich und zur Fixation des Endofix


Klettstreifen

- zum Befestigen von Sonden und Schläuchen


Endofix

- zur oralen oder nasalen Fixation von Endotrachealtuben
- Schaumstoffunterlage schützt vor Druckstellen

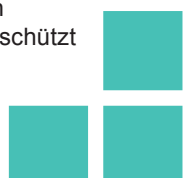


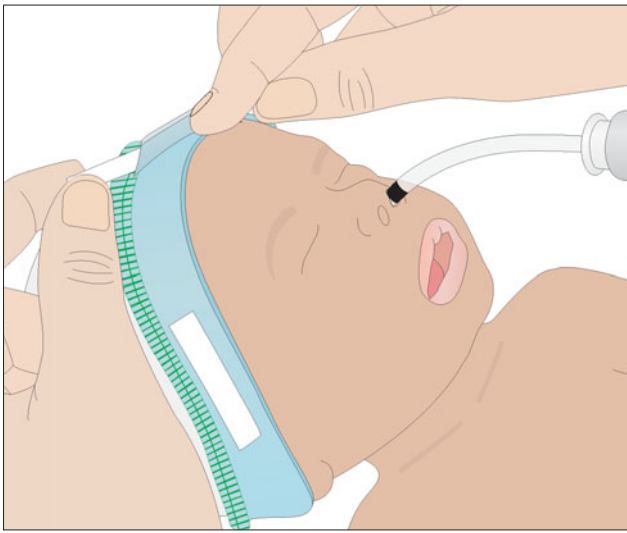


Mütze gemäß Kopfumfang anpassen. Tubus ist nasal intubiert.

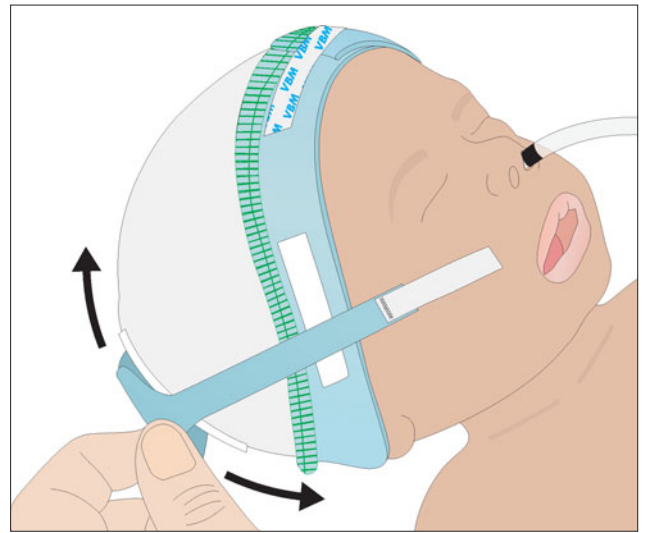

Um den idealen Befestigungswinkel für nasale oder orale Intubation zu erhalten, kann das Halsband individuell positioniert und fixiert werden.

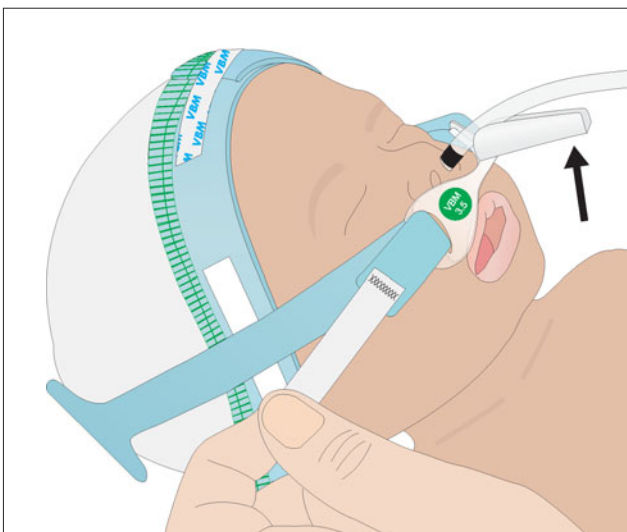

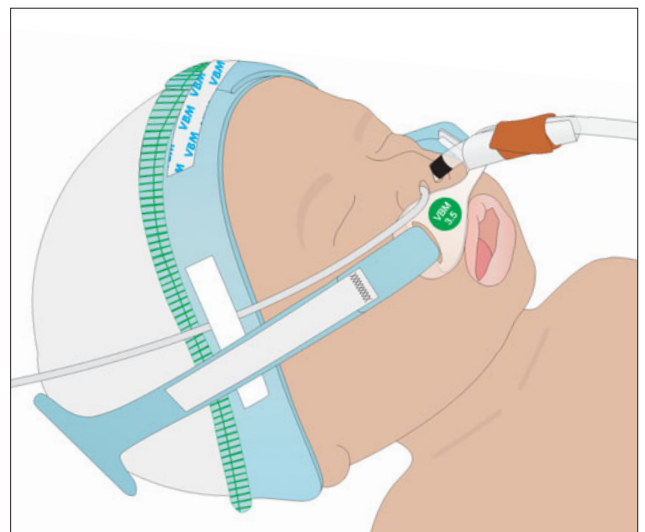


Tubus in den Fixierungssteg klippen und mit einem Pflaster sichern. Halsband festziehen und fixieren.



Zusätzliche Schläuche und Sonden (z.B. Ernährungssonden) können ebenfalls an der Mütze fixiert werden.

Bestellinformation

Größe	Farbcode	Kopfumfang	Baby-Mütze		Baby-Mütze mit Endofix		VE	Größen 0 und 1 mit kleiner Flange
			REF	REF	für ET Tubus			
0	weiß	19-22 cm	40-1900-000	40-1905-000	2.0 - 2.5	5		
1	orange	23-28 cm	40-1900-001	40-1905-001	2.0 - 2.5	5		
2	gelb	28-32 cm	40-1900-002	40-1905-002	2.5	5	Größen 2 bis 5 mit großer Flange 	
3	rot	33-38 cm	40-1900-003	40-1905-003	3.0	5		
4	grün	38-43 cm	40-1900-004	40-1905-004	3.5	5		
5	blau	43-50 cm	40-1900-005	40-1905-005	4.0	5		

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | DE-72172 Sulz a.N. | Germany

Tel.: 07454 / 959650 | Fax: 07454 / 959633 | e-mail: verkauf@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de

